

# РУКОВОДСТВО ПО УСПЕШНОМУ ПОДБОРУ мультифокальных контактных линз ACUVUE®

1. Определите данные субъективной рефракции, основанной на принципе выбора максимальной положительной коррекции для дали (минимально отрицательная или максимально положительная линза), с учетом сфероэквивалента и вертексной поправки.
2. Определите сенсорный доминантный глаз.
  - Рекомендуется провести тест затуманивания зрения с помощью оптической линзы +1,00 D.
3. Определите минимальную функциональную аддидацию, основанную на потребностях пациента при работе на близком расстоянии.
  - Ориентируйтесь на потребности пациента (компьютер, электронная книга, мобильный телефон и т. д.).

## Алгоритм выбора диагностической пары контактных линз:

ADD	Глаз	Выбор линзы
от +0,75 D до +1,25 D	Доминантный глаз	СЛАБАЯ
	Недоминантный глаз	СЛАБАЯ
от +1,50 D до +1,75 D	Доминантный глаз	СРЕДНЯЯ
	Недоминантный глаз	СРЕДНЯЯ
от +2,00 D до +2,50 D	Доминантный глаз	СРЕДНЯЯ
	Недоминантный глаз	ВЫСОКАЯ



Для оценки  
зрения  
пациенту  
необходимо  
**НЕ МЕНЕЕ**  
**10 минут**  
на адаптацию  
к линзам,  
желательно  
вне кабинета  
специалиста

## Если необходимая острота зрения вблизи или вдали НЕ была достигнута, используйте таблицу ниже

Требуется улучшение зрения вдали	Требуется улучшение зрения вблизи
Сферические контактные линзы ACUVUE®	СЛАБАЯ
	СЛАБАЯ +0,25 D к сфере
	СРЕДНЯЯ
	СРЕДНЯЯ +0,25 D к сфере
	СРЕДНЯЯ
	ВЫСОКАЯ +0,25 D к сфере

Применение «Руководства по успешному подбору» позволило подобрать мультифокальные контактные линзы ACUVUE®, используя не более 2 пар диагностических линз<sup>1,2</sup>

94%  
успешных  
подборов<sup>1</sup>



97%  
успешных  
подборов<sup>2</sup>

96%  
успешных  
подборов<sup>3</sup>



Отсканируйте код,  
чтобы открыть  
ОНЛАЙН-калькулятор

# ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

## №1 (острота зрения 1,0)

НЕ ОВРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ТО, ЧТО ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ ВЕТРА, РАСЛАЖНУЧЕ ЧЕХМЕМ ОВАНАКАН ЕГО ВОЛОСАТУЮ ГРУДЬ И ВЕРХОВАЮ ГОЛОВУ ЕЕ, ОН ПОЛУЛЯКА В КРАСНОМ СИКИРКОВОМ КАПУЧИНЕ, МАДИФИКАЦИИ СОВСЕМ ИЗ СЕБЯ ГРОМАДНЫЙ ТРУХКИ, ВЫПУСКАЯ ИЗ РТА И НОСА ГУСТИЕ КЛУБЫ ДЫМЫ И НЕПОД ДОССЧАСТЬЮ ПОШГОМ И АНОЧЫЗЫ ПОВЛЯЮТ.

## №2 (острота зрения 0,9)

С МОРЯ ДУЛ ВЛЖНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, РАЗНОСИ ПО СТЕЛЯ ЗАДУМЧИ ВУ МЕЛОДИЮ ПЛЕСКА НАБЕГАВШЕЙ НА БЕРЕГ ВОЛНЫ И ШЕЛЕСТА ПРИВРЕЖ НЫХ КУСТОВ. ИЗРЕДКА ЕГО ПОНЫ ВПРИНОСИЛИ С СОБОЙ СМОРЩЕННЫЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ И БРОСАЛИ ИХ В КОСТЕР, РАЗДУВАЯ ПЛАМЯ ОКРУЖАЩАЯ И УНИГШЩ ЭКФОНЫ ЗА ПРОЛЖАЧМТЬЮ ЕНИК

## №3 (острота зрения 0,8)

ПОТЕМНЕВШЕЕ ОТ ПЫЛИ ГОЛУБОЕ ЮЖНОЕ НЕБО МУТНО; ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ СМОТРИТ В ЗЕЛЕНОВАТОЕ МОРЕ, ТОЧНО СКВОЗЬ ТОНКУЮ СЕРУЮ ВУАЛЬ. ОНО ПОЧТИ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ В ВОДЕ, РАССЕКАЕМОЙ УДРАМИ ВЕСЕСЕЛ, ПАРХОДНЫХ ХИНТОВ, ОСТРЫМИ КИЛТАНЯЕМ РШОТЬЩЕК ВУЧУЧОИХ ШЛДЬБ

## №4 (острота зрения 0,7)

НА ДАЛЕКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ БЕРЕГА С МОРЯ ПОДИМАЛИСЬ ТЕМНЫЕ ОСТОВЫ СУДОВ, ВОНЗАЯ В НЕБО ОСТРЫЕ МАЧТЫ С РАЗНОЦВЕТНЫМИ ФОНАРЯМИ НА ВЕРШИНАХ. МОРЕ ОТРАЖАЛО ОГНИ ФОНАРЕЙ И БЫЛО УСЕЯНО МАССОЙ ЖЕЛЩДЪ Ж БЮЛГАЮТ ПЛ МИНА МОН ВУСЕ ПУЫ

## №5 (острота зрения 0,6)

ЗВОН ЯКОРНЫХ ЦЕПЕЙ, ГРОХОТ СЦЕПЛЕНИЙ ВАГОНОВ, ПОДВОЯЩИХ ГРУЗ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОПЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ЛИСТОВ, ОТКУДА-ТО ПАДАЮЩИХ НА КАМЕНЬ МОСТОВОЙ, ГЛУХОЙ СТУК ДЕРЕВА, ДРЕБЕЗЖАНИЕ ИЗВОЗЧИЧНЫХ ТЕЛЕГ, СВИСТКИ ПАРОХОДОВ, ТО ПРОНИЗИТЕЛЬНО РЕЗКИЕ, ТО ГЛУХО РЕВУЩИЕ, КРИКИ ГРУЗЧИКОВ, МАТРОСОВ И ТАМОЖЕННЫХ СОЛДАТ – ВСЕ ЭТИ ЗВУКИ СЛИВАЮТСЯ В ОГЛУШИТЕЛЬНУЮ МУЗЫКУ ТРУДОВОГО ДНЯ И, МЯТЕЖНО КОЛХАЯСЬ,

Ф Ы А В П Р Л О Д Ж Ш Т Г И Н М Е С К Ч У Й С Е Т З И М

## №6 (острота зрения 0,5)

...ГРУЗНЫЕ ТУЧИ МЕДЛЕННО ПОЛЗУТ НАД СОННОЙ РЕКОЙ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНИ СПУСКАЮТСЯ ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ВДАЛИ ИХ СЕРЫЕ ЛОХМОТЫ КОСНУЛИСЬ ПОВЕРХНОСТИ БЫСТРЫХ И МУТНЫХ ВЕСЕННИХ ВОЛН, И ТАМ, ГДЕ ОНИ КОСНУЛИСЬ ВОДЫ, ВСТАЛА ДО НЕБЕС НЕПРОНИЦАЕМАЯ СТЕНА ОБЛАКОВ, ЗАГРАДИВШАЯ СОБОЮ ТЕЧЕНИЕ РЕКИ И ПУТЬ ПЛОТАМ, И ВОЛНЫ

Р П М И Т Ь Л Д Ъ З щ Х Ж О Г Н А М С Ч О К П Н Ы У В Ч Ы

## №7 (острота зрения 0,4)

В КРАЙНЕЕ ОКНО МАСТЕРСКОЙ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ МИНУТ ДВАДЦАТЬ СМОТРИТ СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ. СТЕКЛО, РАДУЖНОЕ ОТ СТАРОСТИ, СТАНОВИТСЯ КРАСИВЫМ И ВЕСЕЛЫМ. В ОТКРЫТУЮ ФОРТОЧКУ СЛЫШНО, КАК ВЗВИЗГИВАЕТ ЖЕЛЕЗО ПОЛОЗЬЕВ, ПОПАДАЯ НА ОГОЛЕННЫЙ КАМЕНЬ МОСТОВОЙ, И ВСЕ ЗВУКИ УЛИЦЫ

Х Я Ф Ж Ы Д В Л А Р П Н И С У Т Ч Ь Я Б Ч Ю З Н Ш Е З У О Й У

## №8 (острота зрения 0,3)

ЧЕМ ДАЛЬШЕ К МОРЮ, ВСЕ ШИРЕ, СПОКОЙНЕЙ ВОЛГА. СТЕПНОЙ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ТАЕТ В ЛУННОМ ТУМАНЕ. ОТ ГЛИНИСТЫХ ОБРЫВОВ ПРАВОГО НА РЕКУ ЛЕГЛИ ГУСТИЕ ТЕНИ, И КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ ОГОНЬКИ БАКЕНОВ ОСОБЕННО  
Ц Ш О А Э Ъ Т О С Е К А П Ы У В Е Ч Ы Й Н А Я Т О Л Б

## №9 (острота зрения 0,2)

СНАЧАЛА МЫ СЛЫШАЛИ И ШЕЛЕСТ ЛИСТВЫ ВОКРУГ, И ВСПЛЕСКИ ВОДЫ В ОЗЕРЕ, ЧУВСТВОВАЛИ ПОД СОБОЙ ЗЕМЛЮ... ПОТОМ ПОСТЕПЕННО ГОЛУБОЕ НЕ-  
Е А Н П Р И М К В С Ч У й Ф Я Л Э Щ

## №10 (острота зрения 0,1)

ПЛОТЫ ПЛЫЛИ ДАЛЬШЕ  
Р П Л В А Н И М С Б Н