

ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL FOR ASTIGMATISM*

ТРИ ШАГА УСПЕШНОГО ПОДБОРА

1

Определите
субъективную
рефракцию

2

Определите
сенсорный
доминантный глаз

3

Определите
функциональную
аддидацию

У 90% пользователей линзы успешно подбираются с первой пары на первом визите*¹



ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕФРАКЦИИ

Определить субъективную рефракцию вдаль

цилиндр
 $\leq -0,75$ D

цилиндр
– 1,00 и – 1,25 D

цилиндр
– 1,50 и – 1,75 D

Мульти фокальные линзы
по сферическому
эквиваленту

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day
MULTIFOCAL for
ASTIGMATISM*

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day
MULTIFOCAL for
ASTIGMATISM* и
– 0,25 D к сфере

Точное определение субъективной рефракции для дали
определяет успех всего последующего подбора



*ACUVUE® оазис максимальный однодневный мультифокальный для астигматизма. ЕРУЛ Г004-00110-00/03985587.

«Руководство по подбору мультифокальных КЛ ACUVUE®»; данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон». 2026PP15926

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕНСОРНОГО ДОМИНАНТНОГО ГЛАЗА

Пациент находится в пробной оправе с полной коррекцией зрения вдаль и бинокулярно фиксирует строку, соответствующую максимальной остроте зрения



Поочерёдно перед правым и левым глазом установить сферическую линзу **+1,00 D** или **+1,50 D**, оценивая степень субъективного затуманивания изображения



Сенсорным доминантным считается глаз, перед которым затуманивающая линза вызывает более выраженное ухудшение чёткости изображения

СЕНСОРНОЕ И МОТОРНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В $\leq 40\%$ СЛУЧАЕВ¹

В мультифокальных контактных линзах сенсорный доминантный глаз в большей степени влияет на качество бинокулярного зрения вдаль



1. Lopes-Ferreira D, Neves H, Queiros A, Faria-Ribeiro M, Peixoto-de-Matos SC, González-Méijome JM. Ocular dominance and visual function testing. Biomed Res Int. 2013;2013:238943. doi:10.1155/2013/238943

«Руководство по подборумультифокальных КЛ ACUVUE®»; данные в файлахкомпании «Джонсон & Джонсон».

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АДДИДАЦИЮ

Определите минимальную
аддидацию, достаточную
для комфортного зрения вблизи



Ориентируйтесь на
потребности пациента
(компьютер, мобильный
телефон и т.д.)

Функциональная аддидация учитывает повседневные зрительные
привычки пациента



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИМЕРКА И ОВЕРКОРРЕКЦИЯ: ШАГ ЗА ШАГОМ

- 1 Наденьте первую диагностическую пару**
используйте сферические мультифокальные КЛ из диагностического набора
- 2 Выполните оверкоррекцию**
в пробную оправу установите цилиндры -1,00 D по соответствующим осям
- 3 Оцените бинокулярную остроту зрения**
вдаль и вблизи после периода адаптации пациента к контактным линзам
- 4 При недостаточной остроте зрения на любой дистанции**
скорректируйте параметры согласно рекомендациям в калькуляторе
- 5 При комфортном зрении на всех дистанциях закажите**
необходимые параметры ACUVUE® ACUVUE® OASYS MAX
1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM*

